




ZECKSTICK


Entfernungsanleitung




Fahre mit dem Zeckstick unter die Zecke

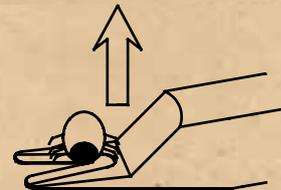

Hebe die Zecke vorsichtig mit dem Zeckenstick an

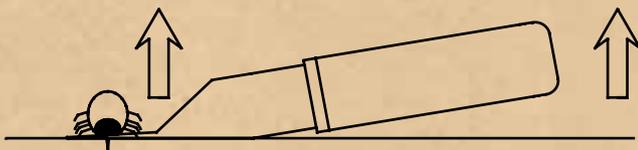

Hebe die Zecke samt Stick gleichmäßig an

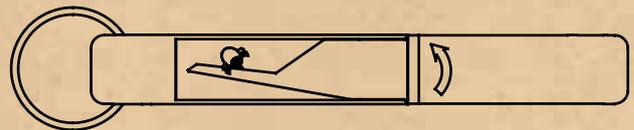

Verstau die Zecke sicher in der Schutzhülse*

Wichtige Hinweise:

Der Zeckenstick minimiert das Risiko durch die sehr einfache und schnelle Anwendung erheblich. Nach dem Entfernen sollte die Einstichstelle desinfiziert werden. Bei Auftreten einer Hautrötung bitte umgehend einen Arzt aufsuchen. Die entfernte Zecke kann in der Schutzhülse zum Arzt gebracht werden. Eine Laboruntersuchung gibt Sicherheit und kann so eine schnellere Behandlung einleiten.

Nach dem Aufenthalt in gefährdeten Gebieten wie z. B. in hohen Gräsern oder Unterholz sollte der Körper gründlich abgesucht werden. Gerne suchen die Zecken eine dünne warme Hautstelle wie Kniekehlen, Hals oder Ohren. Wichtig ist die schnelle und sachgerechte Entfernung der Zecke, da diese oft erst nach 12 bis 24 Stunden die gefährlichen Borrelien-Bakterien überträgt.

Hausmittel wie Öl oder Klebstoff veranlassen die Zecke erst recht diese gefährlichen Erreger abzusondern

*Schutzhülse nur bei Modellen „Der Praktische“ und „Der Anhänger“